



UNICARE[®]

Blue

Víceúčelový roztok **pro měkké** kontaktní čočky
Viacúčelový roztok **na mäkké** kontaktné šošovky

s dezinfekčnou a čistiacou zložkou BACTAC[®] z prírodného kokosového oleje
s dezinfekčnou a čistiacou zložkou BACTAC[®] z prírodného kokosového oleja

Čištění • Dezinfekce • Uchovávaní
Čistenie • Dezinfekcia • Uskladňovanie

240 ml e

Čištění

Umyjte si ruce a důkladně je opláchněte před usušením. Vyjměte čočku z Vašeho pravého oka a položte si ji do dlaně. Kápněte 8 kapek roztoku UniCare[®] Blue na čočku. Ukazováčkem zlehka promněte čočku po dobu přibližně 30s. Poté vezměte čočku mezi palec a ukazováček, aby přebytečný roztok UniCare[®] Blue mohl odkapat. Optimálního čistícího efektu může být dosaženo opakováním této procedury.

Dezinfekce a uchovávaní

Pro optimální dezinfekci Vašich kontaktních čoček musí být čočky uloženy v pouzdře nejméně 6 hodin. UniCare[®] Blue roztok v pouzdře musíte vyměňovat každý den. Jestliže nebudete čočky po delší dobu používat, musíte je uchovávat v UniCare[®] Blue roztoku. Při uchovávaní roztoku UniCare[®] Blue při teplotě vyšší než pokojové se bude antimikrobiální účinnost snižovat. Roztok musí být spotřebován do 90ti dnů po otevření. Ukládejte mimo dosah dětí.

Složení: BACTAC[®] 0,008%

POUŽITÍ MODRÉHO UNICARE ROZTOKU

ANO čištění • dezinfekce • uchovávaní **NE** tepelná dezinfekce (vyvařování)
DRUH ČOČEK výlučně měkké kontaktní čočky **ZNAČKA ČOČEK** všechny značky

Čistenie

Umyte si ruky, dôkladne ich opláchnite a vysušte. Vyberte šošovku z pravého oka a položte si ju na dlaň. Kvapnite na ňu 8 kvapiek UniCare[®] Blue. Ukazovákom asi 30 sekúnd jemne trite každú jej stranu, potom šošovku podržte medzi palcom a ukazovákom, aby prebytočný roztok mohol odkvapkať. Optimálny čistiaci efekt dosiahnete opakovaním tohto postupu.

Dezinfekcia a uskladňovanie

Na dosiahnutie optimálnej dezinfekcie musia byť šošovky najmenej 6 hodín uložené v puzdre naplnenom roztokom. Roztok v puzdre musíte vymieňať každý deň. Ak nebudete šošovky dlhší čas používať, uskladňujte ich výlučne v puzdre v roztoku UniCare[®] Blue. Uskladňovaním roztoku pri vyššej ako izbovej teplote sa bude znižovať jeho antimikrobiálna účinnosť. Roztok sa musí po otvorení spotrebovať do 90 dní. Uskladňujte mimo dosahu detí.

Zloženie: BACTAC[®] 0,008%

POUŽITIE MODRÉHO ROZTOKU UniCare[®]

ÁNO čistenie • dezinfekcia • uskladňovanie **NIE** tepelná dezinfekcia (vyváranie)
DRUH ŠOŠOVIEK výlučne mäkké kontaktné šošovky **ZNAČKA ŠOŠOVIEK** všetky značky